



Ekstra beskyttelse

Dansac tilbehørsprodukter

Innledning

Hos Dansac er vi dedikerte til å utvikle stomiposer- og plater for å forbedre livskvaliteten hos personer med stomi.

Av og til kan huden ha bruk for litt ekstra pleie eller bedre beskyttelse.

Ved siden av å produsere stomiutstyr av høy kvalitet tar vi også hånd om disse spesielle behovene. Dette gjør vi ved å tilby tilbehørsprodukter som er enkle å bruke og som kan bidra til å gjøre hverdagen mer behagelig og sikker.

Denne brosjyren beskriver de forskjellige tilbehørsproduktene som Dansac tilbyr. Produktene kan hjelpe mot problemer som lekkasje, tørr og irritert hud, samt ubehagelig lukt.

Innhold



Dansac X-tra Strips, elastiske plateforsterkere	4
Dansac Seal, formbar tetningsring	6
Dansac Soft Pasta	8
Dansac Adhesive Remover, klebefjerner	10
Dansac Skin Creme	12
Dansac Nodor S lukt fjerner	14
Dansac Skin Lotion	16
Dansac stomibelte	18



DANSAC **X-TRA STRIPS**


Elastiske plateforsterkere

Ekstra sikkerhet

Ekstra beskyttelse rundt hudplaten gir økt trygghet og sikkerhet

Dansac X-tra Strips er en silikonfri og fleksibel løsning for alle som ønsker ekstra beskyttelse rundt hudplaten. Dansac X-tra Strips har et 3-delt design som passer alle typer stomiutstyr. De elastiske plateforsterkerne holder hudplaten sikkert på plass og er enkle og trygge i bruk.

Den myke, elastiske og hudvennlige hydrokolloiden gjør at plateforsterkeren føyer seg godt inn i hudfolder og ujevnheter og følger alle kroppens bevegelser.

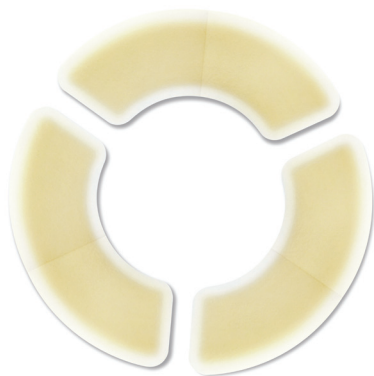

DANSAC X-TRA STRIPS

Elastiske plateforsterkere

Tilbehør

	REF	Varenummer	Stk.
Plateforsterkere	075 - 30	962033	30



- Passer til alle typer hudplater
- Ekstra beskyttelse rundt hudplaten
- Hudvennlig og fleksibel



DANSAC **SEAL**

Formbar tetningsring

Ekstra sikkerhet

Ekstra beskyttelse der behovet er størst

Hudfolder, arr og ujevnheter kan gjøre det vanskelig å få det tett mellom huden og stomiutstyret. Dansac formbar tetningsring med ikke-sentrert starthull kan dreies, deles, strekkes og tilpasses etter behov. Tetningsringene kan plasseres direkte på huden eller på platen og fjernes enkelt uten å etterlate kleberester.

Fleksibiliteten og fasongen gjør det mulig å dreie tetningsringen dit behovet for beskyttelse er størst. Med fire ulike størrelser og mulighet for individuell tilpasning passer den til enhver stomi. Dansac formbar tetningsring kan tilpasses og justeres igjen og igjen uten å gå i stykker eller miste klebeevne.

Den 3 mm tykke ringen inneholder ikke alkohol og svir derfor ikke når den settes på.

Dansac formbar tetningsring er individuelt pakket i biologisk nedbrytbare etuier som gir enkel bruk og praktisk oppbevaring.



DANSAC SEAL
Formbar tetningsring

Tilbehør



Hullstørrelse	REF	Varenummer	Stk.
20 mm	070-20	817285	30
30 mm	070-30	899536	30
40 mm	070-40	868521	30
50 mm	070-50	839883	30



- Ekstra sikkerhet
- Ikke-sentrert starthull for ekstra beskyttelse

Ekstra sikkerhet

Fyller ut arr og hudfolder

Det er ikke uvanlig å ha hudfolder og ujevnheter i området rundt stomien. Dette er forhold som kan gjøre det vanskelig å feste hudplaten på en sikker og god måte.

Dansac Soft Pasta er ideell til å utfylle ujevnheter slik at hudplaten festes sikkert rundt stomien eller fistelen. Pastaen beskytter huden ved å minske risikoen for lekkasje, og den kan være med på å forlenge utstyrets bæretid.

Pastaen smøres enkelt på tørr hud eller direkte på platen ved å bruke en fuktet finger eller en spatel. Deretter kan pastaen formes for å skape en jevn overflate. Vent i 30 sekunder før du setter på hudplaten.

Ved behov kan Dansac Soft Pasta brukes sammen med Dansac formbare tetningsringer.



 DANSAC SOFT PASTA

Tilbehør

Størrelse	REF	Varenummer
14,2 g	77514 - 2	899006
50,0 g	77550 - 0	840340



- Jevner ut huden rundt stomien
- Beskytter huden



DANSAC ADHESIVE **REMOVER**

Klebefjerner

Ekstra enkelt

Rask og enkel fjerning av stomiutstyret

Med Dansac klebefjerner kan du enkelt og skånsomt fjerne stomiutstyret ditt.

Dansac klebefjerner er silikonbasert, inneholder ikke alkohol og svir ikke - heller ikke på sår hud. Den løser raskt opp overskytende klebemateriale og gjør det enkelt for deg å fjerne både stomiplaten og eventuelle kleberester.

Dansac klebefjerner fås både som spray og servietter.

Produktene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Bruk sprayen til å fjerne hudplaten og servietten til eventuelle kleberester. Fukt en kompress med rent vann og tørk av huden rundt stomien. Serviettene er diskrete og praktiske å ta med seg når du er på farten.



DANSAC ADHESIVE **REMOVER**

Klebefjerner

Tilbehør

	REF	Varenummer	Innhold
Servietter	082 - 30	960653	30 stk
Spray	083 - 01	967499	50 ml



- Svir ikke (alkoholfri)
- Rask og enkelt fjerning av stomiplaten
- Silikonbasert
- Spray og servietter

Ekstra fuktighet

Forebygg tørr og irritert hud

Av og til opplever man at huden rundt stomien kan bli tørr og irritert. Gjennom å påføre en mengde krem tilsvarende et fyrstikkhode kan du forebygge tørr og irritert hud.

Kremen inneholder Aloe Vera og A, D og E vitamin og har en lindrende og fuktgivende virkning på huden. Dansac Skin Creme er uten fett og påvirker derfor ikke platens klebeevne. Kremen er også uten farge og lukt.

Kremen trenger raskt inn i huden og etterlater den bløt og smidig.



 DANSAC SKIN CREME

Tilbehør

Innhold	REF	Varenummer
100 ml	085 - 00	889015



- Lindrer og fukter huden
- Forebygger hudirritasjon
- Inneholder Aloe Vera, A, D og E vitamin
- Fettfri og luktfri

Ekstra diskresjon

Nøytraliserer sjenerende lukt

Tilsett Dansac Nodor S i posen for å nøytralisere lukten av avføring eller urin, samt minske risikoen for ubehagelig lukt ved tømning eller skifte av pose.

Dansac Nodor S er et trygt produkt som inneholder vann og en oppløsning av aluminium og sinkssalter. Produktet har ingen duft i seg selv og virker ved at saltmolekylene absorberer lukt.

Dansac Nodor S finnes både i liten flaske som er enkel å ta med og en større flaske til hjemmebruk.



 DANSAC NODOR S

Tilbehør

Innhold	REF	Varenummer
50 ml	080 - 00	917630
250 ml	080 - 01	908222



- Unngå ubehagelig lukt
- Inneholder vann, aluminium og sinksalter

Effektiv rengjøring - uten vann

Rengjøring av huden rundt stomien

Enkelte ganger har man ikke tilgang til rent vann - da er Dansac Skin Lotion ideell til rengjøring av huden rundt stomien.

Påfør Dansac Skin Lotion på en tørr kompress og rengjør huden rundt stomien. Klapp huden forsiktig tørr før du setter på nytt stomiutstyr.

NB! Dansac Skin Lotion er ikke på refusjon



 DANSAC SKIN LOTION

Tilbehør

	REF	Innhold
Flaske	70000 - 0000	200 ml
Servietter	71000 - 0000	50 stk



- Mild såpe
- Effektiv rengjøring av huden rundt stomien
- Uten vann



DANSAC **STOMIBELTE**

Ekstra støtte

Ekstra støtte til stomiplaten

Dansac stomibelte festes i platens belteører for å gi ekstra støtte til hudplaten. Behold beltet på den første timen etter hudplaten er satt på for at kleberen skal feste bedre.

Dansac stomibelte finnes i to størrelser og to farger.



Tilbehør

Størrelse	REF	Varenummer	Farge
100 cm	09000-0000	824578	Hvit
100 cm	090-02	920959	Beige
150 cm	090-03	920960	Beige



- Ekstra støtte til stomiplaten

Dansac tilbehør

Av og til har huden bruk for litt ekstra pleie eller beskyttelse.

Dansac har et bredt sortiment tilbehørsprodukter som hjelper deg

å passe på huden din:

Dansac X-tra Strips, elastiske plateforsterkere

Ekstra beskyttelse rundt stomiplaten

Dansac Seal, formbar tetningsring

Ekstra beskyttelse akkurat der behovet er størst

Dansac Soft Pasta

Jevner ut hudfolder, arr og ujevnheter

Dansac Adhesive Remover, klebefjerner

Rask og enkel fjerning av stomiplaten

Dansac Skin Lotion

Rengøring av huden rundt stomien

Dansac Skin Creme

Tilfører huden fuktighet

Dansac Nodor S, luktfjerner

Nøytraliserer ubehagelig lukt

Dansac stomibelte

Gir ekstra støtte til hudplaten